


## NRX<sup>®</sup> Strap · Abdukční páska pro palec

Materiál

NRX<sup>®</sup> Strap 30 mm a 50 mm + 3 suché zipy

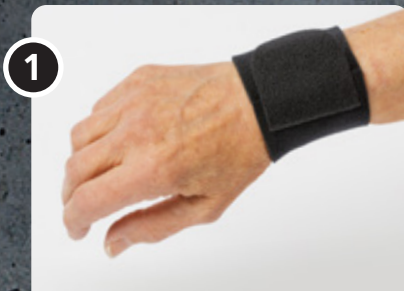

1

Ustříhnete dle obvodu zápěstí z 50 mm NRX<sup>®</sup> Strap pásku s rezervou 2-3 cm. Aplikujte kolem zápěstí a zajistěte suchým zipem. Pak ustříhnete přibližně 8-10 cm dlouhou pásku z 30 mm NRX<sup>®</sup> Strap.



2

Aplikujte pásku kolem thenaru a zajistěte pomocí suchého zipu.



3

Na druhý konec připevněte suchý zip a opatrně napněte, abyste zajistili abdukční podporu pro palec.



4

Pro účinnější podporu připevněte pásku na ulnární straně. V případě potřeby upravte délku pásky. Pokud je potřeba menšího abdukčního tahu připevněte pásku na dorzální straně zápěstí.

### Pokyny k údržbě

NRX<sup>®</sup> Strap lze prát v pračce na 40 stupňů v tekutém pracím prostředku. Vždy používejte sáček na prádlo. Před praním odstraňte suché zipy a nechte pásky uschnout volně na vzduchu.