

NRX[®] Strap · Abdukční smyčka pro palec

Materiál

NRX[®] Double 30 mm + 2 suché zipy

1



Na tuto aplikaci potřebujete NRX[®] Double. Vystříhnete tvar podle obrázku. Nezapomeňte také vystříhnout otvor na provléknutí pásky. Protáhněte pásku skrz otvor a vytvořte malou smyčku. Před aplikací vystříhnete výřez na prostor mezi palcem a ukazovákem. Je-li to nutné, odstříhnete širší část suchého zipu a aplikujete na konec pásky. Suchý zip na bazi palce by měl být připevněn z vnitřní strany a měl by z části vyčnívat tak, aby na něj bylo možné později připevnit druhý konec pásky.

2



Aplikujte smyčku na palec a pásku přetáhněte přes dorzální stranu ruky.

3



Vytáhněte pásku z dorzální strany a připevněte ji k vyčnívající části zipu.

4



Připevněte pásku na ulnární stranu.

5



Při správném použití by měl pacient cítit podporu abdukčního tahu. Pokud je to nutné, odstříhnete zakončení pásky.

Pokyny k údržbě

NRX[®] Strap lze prát v pračce na 40 stupňů v tekutém pracím prostředku. Vždy používejte sáček na prádlo. Před praním odstraňte suché zipy a nechte pásky uschnout volně na vzduchu.