

NRX® Strap · Podpora Extenze Zápěstí

Materiál

NRX® Strap Double 110 mm, NRX® Strap 30 mm, NRX® Strap PLUS 50 mm

1



Začněte ustřížením pásky na MCP v požadované šířce dle parametrů pacienta. Vystříhnete 3 až 4 oválné otvory pro prsty. Ustříhnete volární pásku z 30 mm NRX® Strap. Ustříhnete 5 cm kotvy z NRX® PLUS. Pro tuto aplikaci potřebujete 3 širší suché zipy a 2 úzké.

2



Pásku navlékněte na prsty skrz otvory.

3



Zajistěte přesah z palmární strany pomocí 30 mm NRX® Strap dvěma suchými zipy.



Pokyny k údržbě

NRX® Strap lze prát v pračce na 40 stupňů v tekutém pracím prostředku. Vždy používejte sáček na prádlo. Před praním odstraňte suché zipy a nechte pásky uschnout volně na vzduchu.

4



Aplikujte horní kotvu a extenční pásku provlečte pod ní. Přeložte jí přes horní okraj kotvy a zajistěte suchým zipem.



5



Páska pro zajištění extenze zápěstí by měla mít určité napětí.

6



Kolem zápěstí obtočte pásku z 50 mm NRX® Strap a zajistěte ji.

7



Pro zajištění větší extenze v zápěstí lze pásku dále dotáhnout přes horní kotvu.

